


Comfort

Made in Japan

コンフォートHPステント／
コンフォートステント

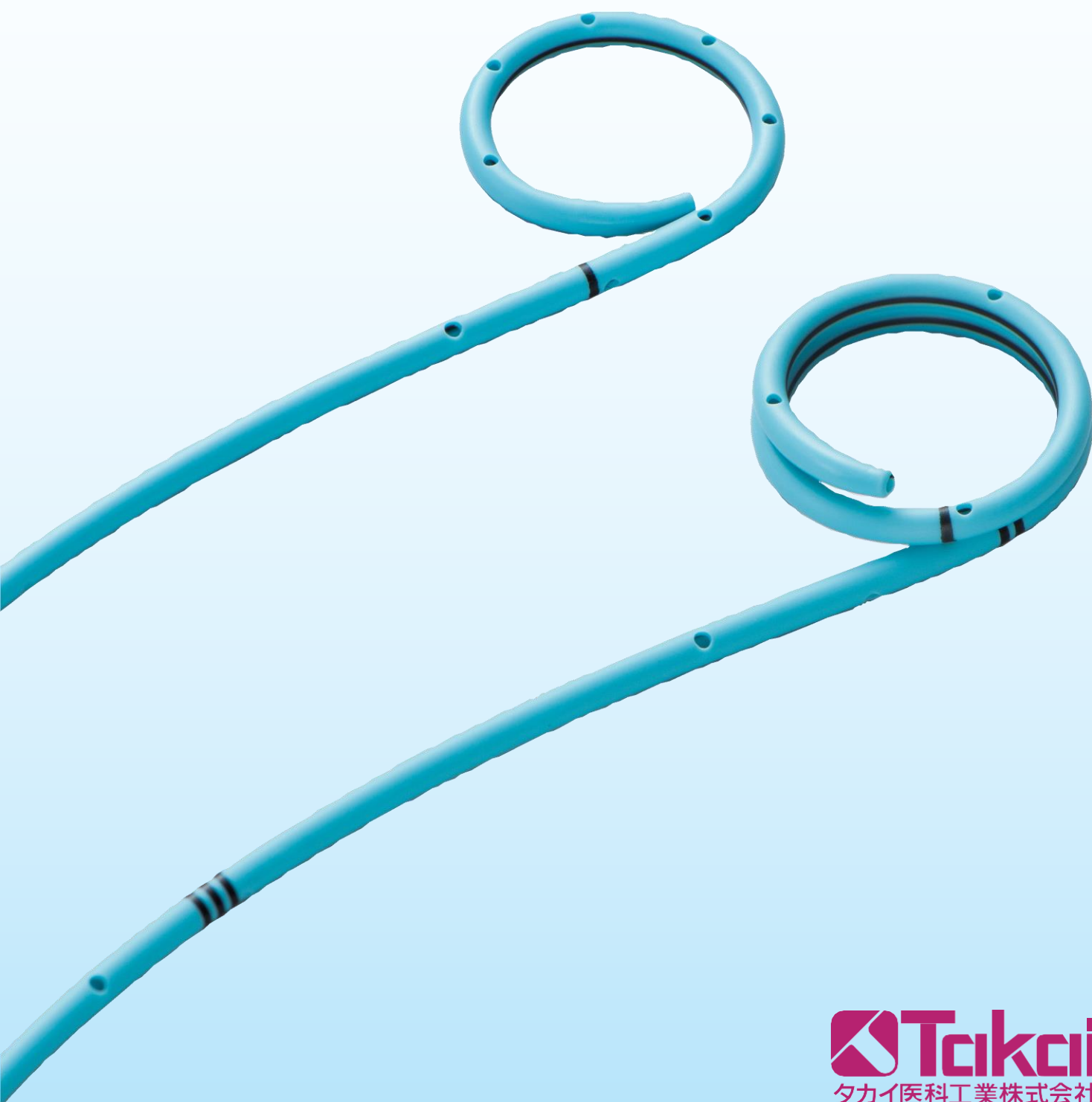

最適の選択が可能な「国産」セミオーダーステント

四種類のレングスタイプ

ダブルピッグテイル型

両側一重コイル

マルチレングス型

両側二重コイル

ユニ マルチレングス型


膀胱側：三重コイル、腎盂側：一重コイル

ユニ マルチレングスII型

膀胱側：二重コイル、腎盂側：一重コイル

※シャフト部側孔なしタイプの選択も可能

二種類の特徴的なガイドワイヤー

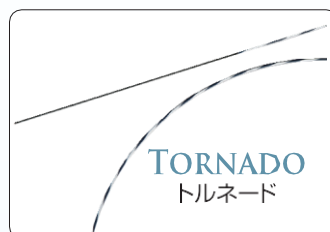


コシのあるシャフト
先端7cmは親水性
フレキシブルチップ

刺激症状を低減する素材とデザイン

患者快適性を向上

体内での柔軟性に富む独自のソフトポリウレタン素材が、患者快適性を向上

コンフォートと他社ステントを37℃の人工尿に1時間浸漬させたときの柔軟性を計測 <in vitro>

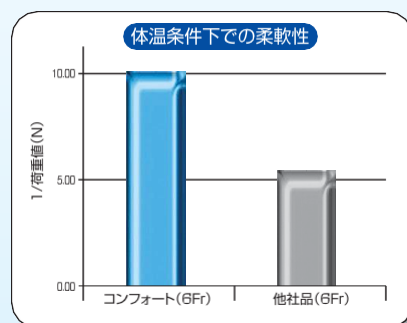



刺激低減型のコイルデザイン

コイル先端を内側に巻き込んだことで、腎盂内・膀胱への刺激を低減



良好なドレナージ効率

内腔の拡大(ハイクロー化)により、排尿性能を向上

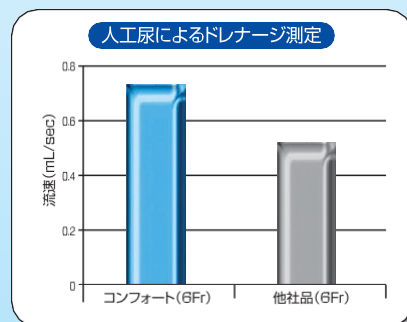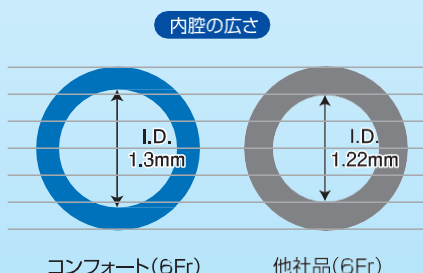


優れた留置性能を生む技術

安定性の高いHPコーティング


ステントと相性の良い独自のHP（ハイドロフィリック）コーティングは、優れた滑りと耐久性を発揮

コンフォートと他社ステントにおけるステント表面の親水性コーティング耐久性試験<in vitro>の結果、コンフォートのHPコーティングは繰り返しの摩擦に耐え、他社ステントよりも滑らかさが持続することが認められた

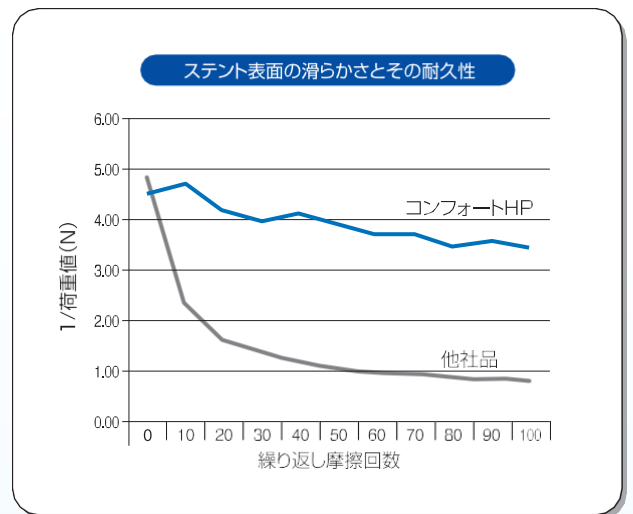

平滑性に優れたHPコーティング表面


3Dマイクロスコープにより1000倍率で撮影<in vitro>

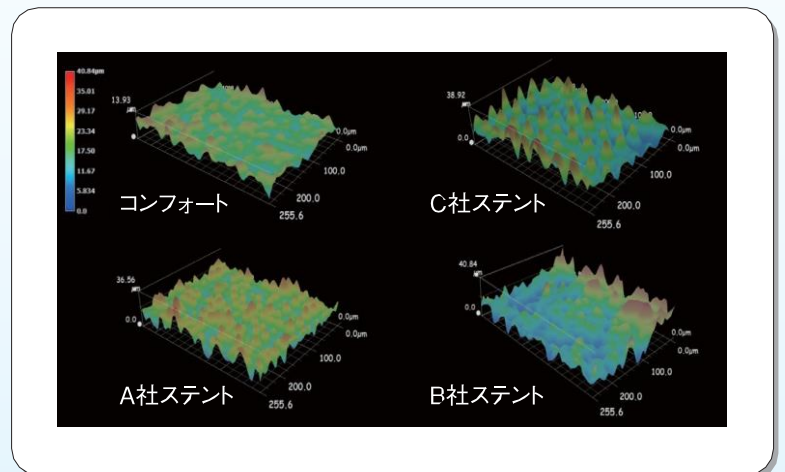


尿管壁外性の尿管閉塞(MEUO)に対する留置で92%のSuccess Rate

進行性消化器癌における尿管壁外性閉塞(Malignant Extrinsic Ureteral Obstruction: MEUO)に対する留置で、(1)ステントが留置されているにもかかわらず水腎症が増悪し腎瘻を造設した場合、(2)閉塞や結石付着などによりステント交換予定日よりも早期に交換が必要になった場合、のいずれも認めなかった症例をSuccessと定義<in vivo>


出展: 共同研究「進行性悪性腫瘍を原因とする尿管閉塞に対する尿管ステント留置の有効性の検証」
独立行政法人国立がん研究センター東病院 泌尿器科・後腹膜腫瘍科 駒井好信 先生／タカイ医科工業株式会社 2014年

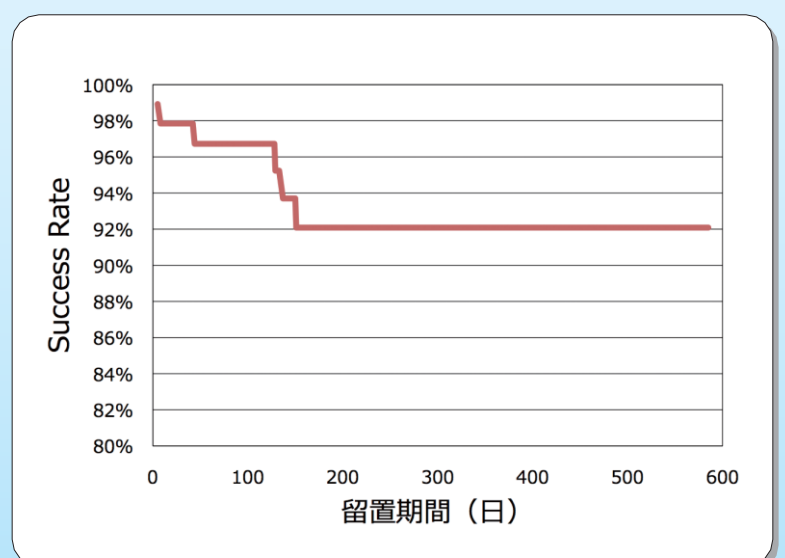

Contents

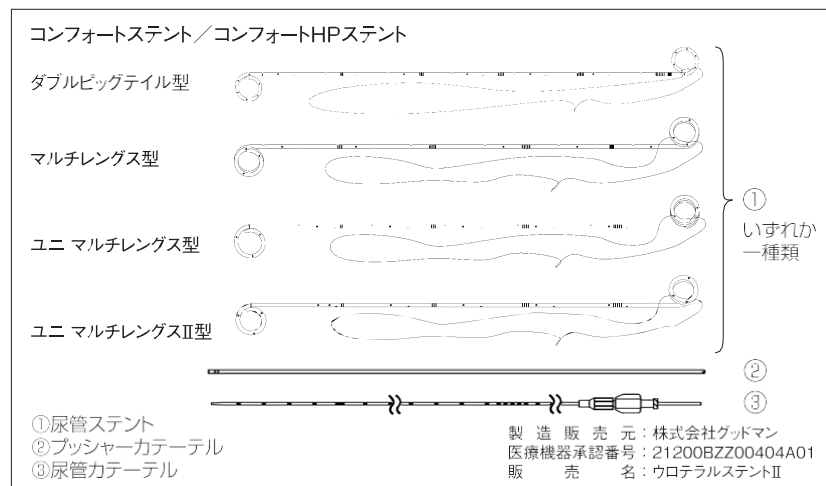

トルネード ガイドワイヤー

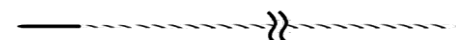

製造販売元：株式会社バイオラックスメディカルデバイス
医療機器承認番号：21600BZZ00536000
販売名：バイオラックス親水性ガイドワイヤー-LZ

〈償還区分〉 尿管ステントセット(1)一般型 ①標準型

Ordering Information

●コンフォートHPステント(親水性コーティング) ※注文番号のXXにはご希望のステント長を入れてください

	コンフォートステント		トルネードセット		
	径	長さ	注文番号 ガイドワイヤーなし	注文番号 ストレート	注文番号 アングル
ダブル ビッグテイル	4.8Fr	20,22, 24,26, 28,30cm	TG-11148XX	TG-11148XX-TN	TG-11148XX-TNA
	6.0Fr		TG-11160XX	TG-11160XX-TN	TG-11160XX-TNA
	7.0Fr		TG-11170XX	TG-11170XX-TN	TG-11170XX-TNA
	8.0Fr		TG-11180XX	TG-11180XX-TN	TG-11180XX-TNA
マルチ レングス	4.8Fr	22~32cm	TG-1114800	TG-1114800-TN	TG-1114800-TNA
	6.0Fr		TG-1116000	TG-1116000-TN	TG-1116000-TNA
	7.0Fr		TG-1117000	TG-1117000-TN	TG-1117000-TNA
	8.0Fr		TG-1118000	TG-1118000-TN	TG-1118000-TNA
ユニ マルチ レングス	4.8Fr	22~32cm	TG-1114801	TG-1114801-TN	TG-1114801-TNA
	6.0Fr		TG-1116001	TG-1116001-TN	TG-1116001-TNA
	7.0Fr		TG-1117001	TG-1117001-TN	TG-1117001-TNA
	8.0Fr		TG-1118001	TG-1118001-TN	TG-1118001-TNA
ユニマルチ レングスII	4.8Fr	22~26cm	TG-1114802	TG-1114802-TN	TG-1114802-TNA
	6.0Fr		TG-1116002	TG-1116002-TN	TG-1116002-TNA
	7.0Fr		TG-1117002	TG-1117002-TN	TG-1117002-TNA
	8.0Fr		TG-1118002	TG-1118002-TN	TG-1118002-TNA

●コンフォートステント(コーティングなし) ※注文番号のXXにはご希望のステント長を入れてください

	コンフォートステント		トルネードセット		
	径	長さ	注文番号 ガイドワイヤーなし	注文番号 ストレート	注文番号 アングル
ダブル ビッグテイル	4.8Fr	20,22, 24,26, 28,30cm	TG-12148XX	TG-12148XX-TN	TG-12148XX-TNA
	6.0Fr		TG-12160XX	TG-12160XX-TN	TG-12160XX-TNA
	7.0Fr		TG-12170XX	TG-12170XX-TN	TG-12170XX-TNA
	8.0Fr		TG-12180XX	TG-12180XX-TN	TG-12180XX-TNA
マルチ レングス	4.8Fr	22~32cm	TG-1214800	TG-1214800-TN	TG-1214800-TNA
	6.0Fr		TG-1216000	TG-1216000-TN	TG-1216000-TNA
	7.0Fr		TG-1217000	TG-1217000-TN	TG-1217000-TNA
	8.0Fr		TG-1218000	TG-1218000-TN	TG-1218000-TNA
ユニ マルチ レングス	4.8Fr	22~32cm	TG-1214801	TG-1214801-TN	TG-1214801-TNA
	6.0Fr		TG-1216001	TG-1216001-TN	TG-1216001-TNA
	7.0Fr		TG-1217001	TG-1217001-TN	TG-1217001-TNA
	8.0Fr		TG-1218001	TG-1218001-TN	TG-1218001-TNA

シャフト部側孔なしタイプの
ステントも選択可能です

※注文番号の数字の3桁目を
「2」にしてください

〈注文番号例(6.0Fr、24cm の場合)〉
親水性コーティング：TG-1116024 → TG-11²6024
コーティングなし：TG-1216024 → TG-12²6024

●構成品のサイズ

尿管ステント		プッシャーカテーテル		尿管カテーテル	
径	長さ	径	長さ	径	長さ
4.8Fr	70cm	5.0Fr	70cm	5.0Fr	70cm
6.0Fr	45cm	6.0Fr	70cm	6.0Fr	70cm
7.0Fr	45cm	7.0Fr	70cm	7.0Fr	70cm
8.0Fr	45cm	8.0Fr	70cm	8.0Fr	70cm

※ガイドワイヤーセットの場合

径	長さ
0.035inch	150cm

販売元(セット詰め合わせ元)



タカイ医科工業株式会社

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-28-25東京ダイヤビルディング3号館9階

TEL (03) 6280-4255 FAX (03) 6280-4253

名古屋営業所 〒465-0078 名古屋市中東区にじが丘 2-5-107 TEL (052) 781-8290 FAX (052) 781-8292

大阪営業所 〒540-0026 大阪市中央区内本町 2-1-19-811 TEL (06) 6946-6629 FAX (06) 6946-9413

福岡営業所 〒812-0016 福岡市東区多摩川 42-10 南ビル TEL (092) 414-5525 FAX (092) 414-5530

●取扱販売店名