


# Comfort

*Made in Japan*

コンフォートHPステント／  
コンフォートステント

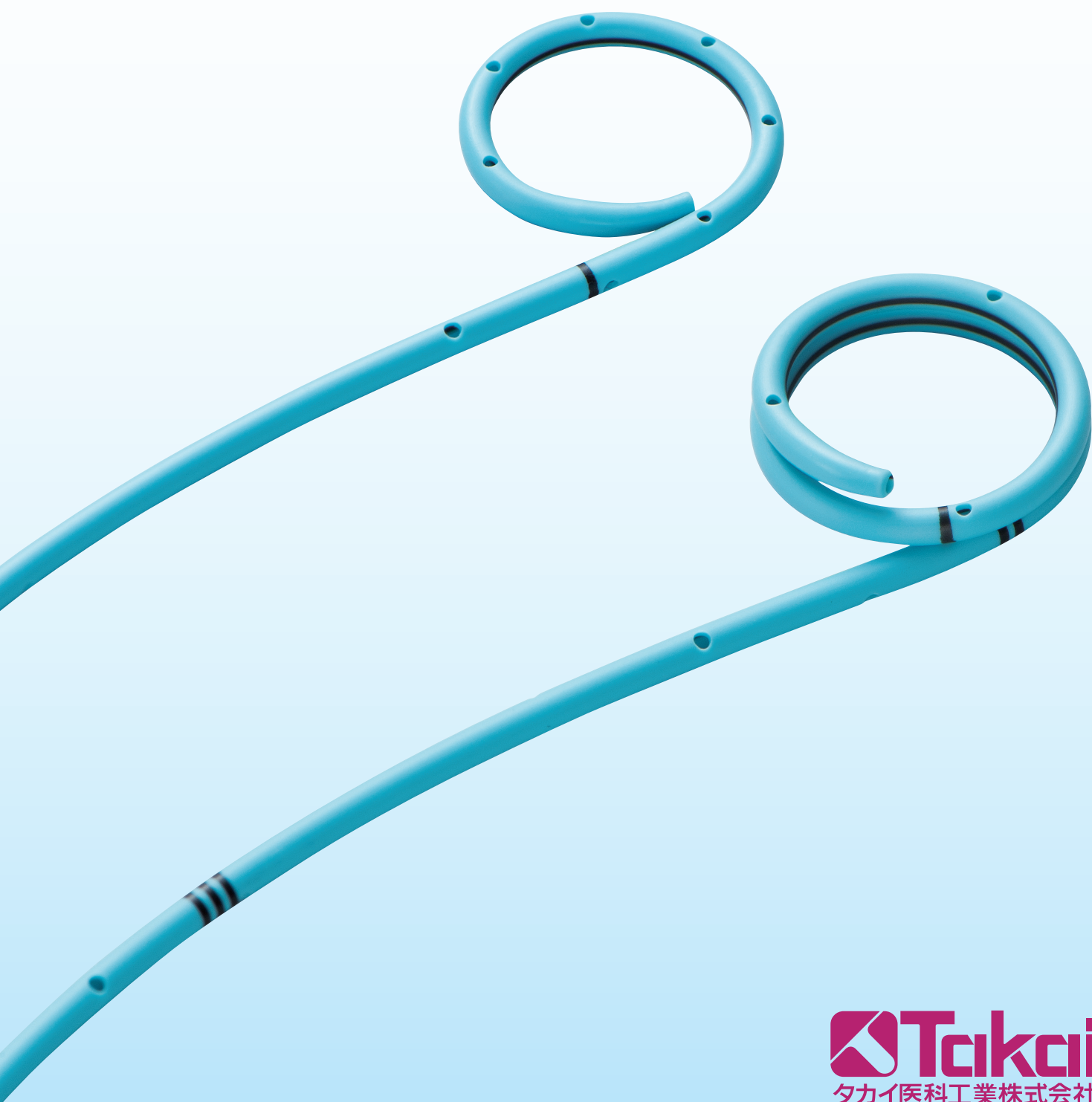

 **Taikai**  
タカイ医科工業株式会社

# 最適の選択が可能な「国産」セミアダースtent

## 四種類のレングスタイプ

### ダブルピッグテイル型

両側一重コイル

### マルチレングス型

両側二重コイル

### ユニ マルチレングス型


膀胱側：三重コイル、腎盂側：一重コイル

### ユニ マルチレングスII型


膀胱側：二重コイル、腎盂側：一重コイル

※シャフト部側孔なしタイプの選択も可能

## 二種類の特徴的なガイドワイヤー

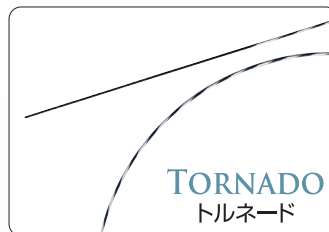

コシのあるシャフト  
先端7cmは親水性  
フレキシブルチップ

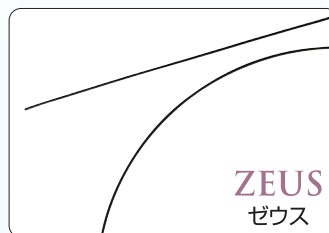


“優れた柔軟性”と  
“適度なコシ”  
厳格な国内水準で  
施された親水性  
コーティング

# 刺激症状を低減する素材とデザイン

## 患者快適性を向上

体内での柔軟性に富む独自のソフトポリウレタン素材が、患者快適性を向上

コンフォートと他社ステントを37℃の人工尿に1時間浸漬させたときの柔軟性を計測 <in vitro>

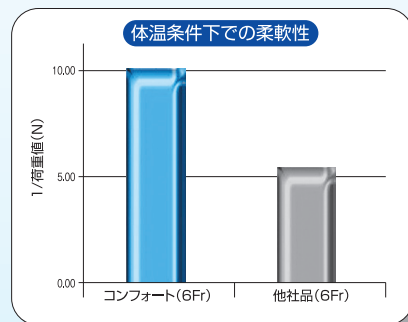



## 刺激低減型のコイルデザイン

コイル先端を内側に巻き込んだことで、腎盂内・膀胱への刺激を低減



## 良好なドレナージ効率

内腔の拡大(ハイフロー化)により、排尿性能を向上

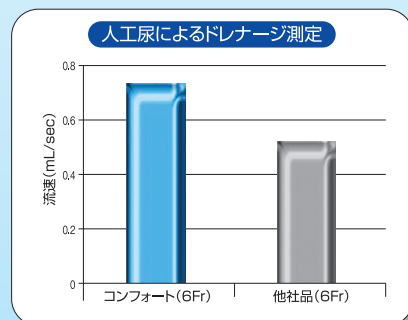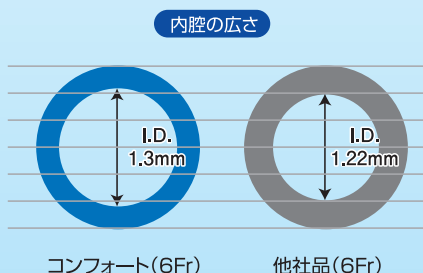


# 優れた留置性能を生む技術

## 安定性の高いHPコーティング


ステントと相性の良い独自のHP(ハイドロフィリック)コーティングは、優れた滑りと耐久性を発揮

コンフォートと他社ステントにおけるステント表面の親水性コーティング耐久性試験<in vitro>の結果、コンフォートのHPコーティングは繰り返しの摩擦に耐え、他社ステントよりも滑らかさが持続することが認められた

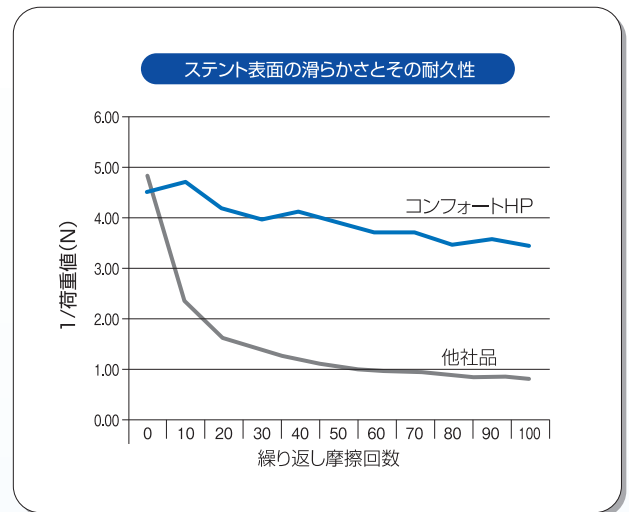

## 平滑性に優れたHPコーティング表面


3Dマイクロスコープにより1000倍率で撮影<in vitro>

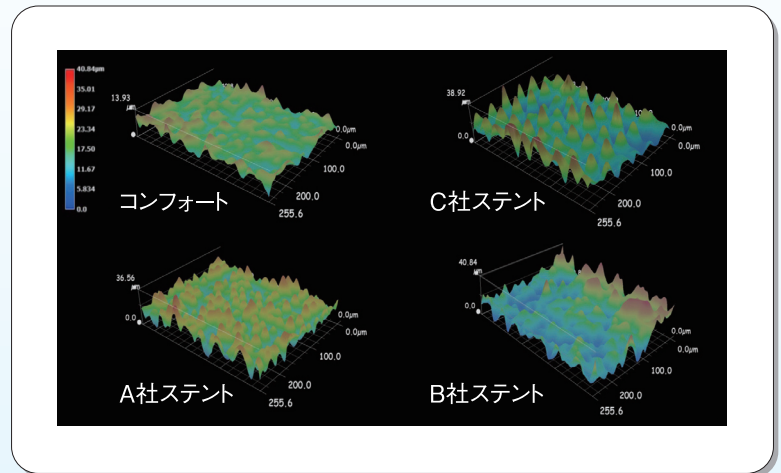




## 尿管壁外性の尿管閉塞(MEUC)に対する留置で92%のSuccess Rate

進行性消化器癌における尿管壁外性閉塞(Malignant Extrinsic Ureteral Obstruction: MEUC)に対する留置で、(1)ステントが留置されているにもかかわらず水腎症が増悪し腎瘻を造設した場合、(2)閉塞や結石付着などによりステント交換予定日よりも早期に交換が必要になった場合、のいずれも認めなかった症例をSuccessと定義<in vivo>

出展:共同研究「進行性悪性腫瘍を原因とする尿管閉塞に対する尿管ステント留置の有効性の検証」  
独立行政法人国立がん研究センター東病院 泌尿器科・後腹膜腫瘍科 駒井好信 先生 / タカイ医科工業株式会社 2014年

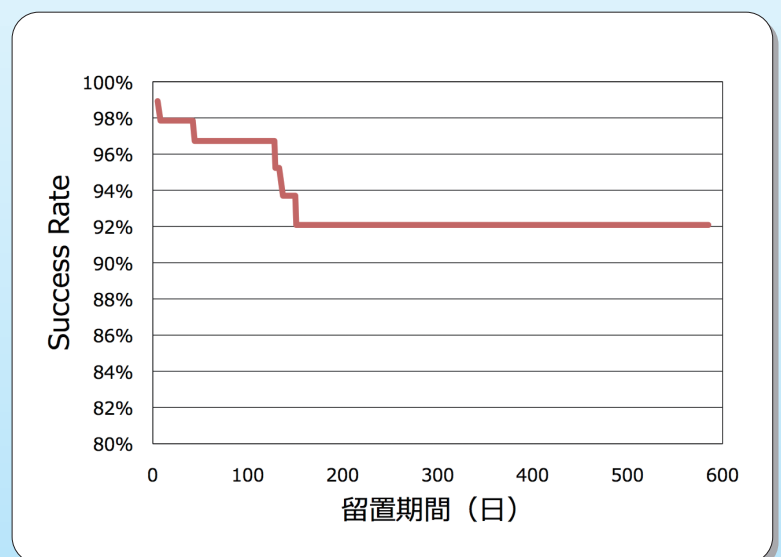

# Contents

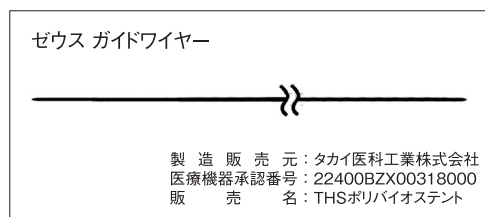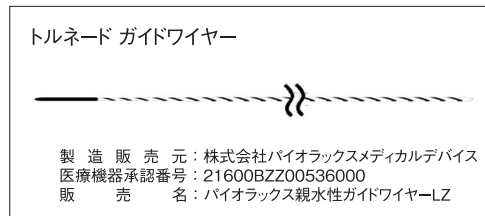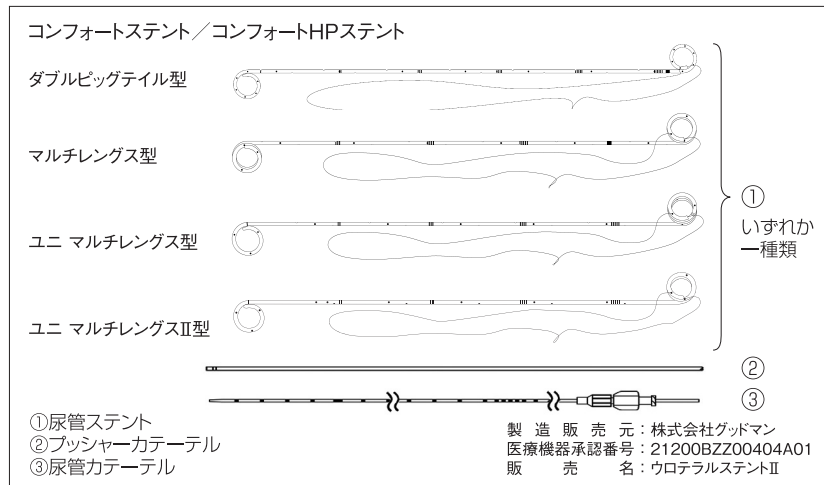

※ガイドワイヤーはトルネード、ゼウス どちらか一方から選択

〈償還区分〉 尿管ステントセット(1)一般型 ①標準型

## Ordering Information

### ●コンフォートHPステント(親水性コーティング)

※注文番号のXXにはご希望のステント長を入れてください

	コンフォートHPステント			トルネードセット			ゼウスセット	
	径	長さ	注文番号	注文番号		注文番号		
			ガイドワイヤーなし	ストレート	アングル	ストレート	アングル	
ダブル ピッグテイル	4.8Fr	20,22, 24,26, 28,30cm	TG-11148XX	TG-11148XX-TN	TG-11148XX-TNA	TG-11148XX-UZ	TG-11148XX-UZA	
	6.0Fr		TG-11160XX	TG-11160XX-TN	TG-11160XX-TNA	TG-11160XX-UZ	TG-11160XX-UZA	
	7.0Fr		TG-11170XX	TG-11170XX-TN	TG-11170XX-TNA	TG-11170XX-UZ	TG-11170XX-UZA	
	8.0Fr		TG-11180XX	TG-11180XX-TN	TG-11180XX-TNA	TG-11180XX-UZ	TG-11180XX-UZA	
マルチ レングス	4.8Fr	22~32cm	TG-1114800	TG-1114800-TN	TG-1114800-TNA	TG-1114800-UZ	TG-1114800-UZA	
	6.0Fr		TG-1116000	TG-1116000-TN	TG-1116000-TNA	TG-1116000-UZ	TG-1116000-UZA	
	7.0Fr		TG-1117000	TG-1117000-TN	TG-1117000-TNA	TG-1117000-UZ	TG-1117000-UZA	
	8.0Fr		TG-1118000	TG-1118000-TN	TG-1118000-TNA	TG-1118000-UZ	TG-1118000-UZA	
ユニ マルチ レングス	4.8Fr	22~32cm	TG-1114801	TG-1114801-TN	TG-1114801-TNA	TG-1114801-UZ	TG-1114801-UZA	
	6.0Fr		TG-1116001	TG-1116001-TN	TG-1116001-TNA	TG-1116001-UZ	TG-1116001-UZA	
	7.0Fr		TG-1117001	TG-1117001-TN	TG-1117001-TNA	TG-1117001-UZ	TG-1117001-UZA	
	8.0Fr		TG-1118001	TG-1118001-TN	TG-1118001-TNA	TG-1118001-UZ	TG-1118001-UZA	
ユニ マルチ レングスII	4.8Fr	22~26cm	TG-1114802	TG-1114802-TN	TG-1114802-TNA	TG-1114802-UZ	TG-1114802-UZA	
	6.0Fr		TG-1116002	TG-1116002-TN	TG-1116002-TNA	TG-1116002-UZ	TG-1116002-UZA	
	7.0Fr		TG-1117002	TG-1117002-TN	TG-1117002-TNA	TG-1117002-UZ	TG-1117002-UZA	
	8.0Fr		TG-1118002	TG-1118002-TN	TG-1118002-TNA	TG-1118002-UZ	TG-1118002-UZA	

### ●コンフォートステント(コーティングなし)

※注文番号のXXにはご希望のステント長を入れてください

	コンフォートステント			トルネードセット			ゼウスセット	
	径	長さ	注文番号	注文番号		注文番号		
			ガイドワイヤーなし	ストレート	アングル	ストレート	アングル	
ダブル ピッグテイル	4.8Fr	20,22, 24,26, 28,30cm	TG-12148XX	TG-12148XX-TN	TG-12148XX-TNA	TG-12148XX-UZ	TG-12148XX-UZA	
	6.0Fr		TG-12160XX	TG-12160XX-TN	TG-12160XX-TNA	TG-12160XX-UZ	TG-12160XX-UZA	
	7.0Fr		TG-12170XX	TG-12170XX-TN	TG-12170XX-TNA	TG-12170XX-UZ	TG-12170XX-UZA	
	8.0Fr		TG-12180XX	TG-12180XX-TN	TG-12180XX-TNA	TG-12180XX-UZ	TG-12180XX-UZA	
マルチ レングス	4.8Fr	22~32cm	TG-1214800	TG-1214800-TN	TG-1214800-TNA	TG-1214800-UZ	TG-1214800-UZA	
	6.0Fr		TG-1216000	TG-1216000-TN	TG-1216000-TNA	TG-1216000-UZ	TG-1216000-UZA	
	7.0Fr		TG-1217000	TG-1217000-TN	TG-1217000-TNA	TG-1217000-UZ	TG-1217000-UZA	
	8.0Fr		TG-1218000	TG-1218000-TN	TG-1218000-TNA	TG-1218000-UZ	TG-1218000-UZA	
ユニ マルチ レングス	4.8Fr	22~32cm	TG-1214801	TG-1214801-TN	TG-1214801-TNA	TG-1214801-UZ	TG-1214801-UZA	
	6.0Fr		TG-1216001	TG-1216001-TN	TG-1216001-TNA	TG-1216001-UZ	TG-1216001-UZA	
	7.0Fr		TG-1217001	TG-1217001-TN	TG-1217001-TNA	TG-1217001-UZ	TG-1217001-UZA	
	8.0Fr		TG-1218001	TG-1218001-TN	TG-1218001-TNA	TG-1218001-UZ	TG-1218001-UZA	

シャフト部側孔なしタイプの  
ステントも選択可能です

▶ ※注文番号の数字の3桁目を  
「2」にしてください

〈注文番号例(6.0Fr、24cmの場合)〉

親水性コーティング：TG-1116024 → TG-1126024  
コーティングなし：TG-1216024 → TG-1226024

### ●構成品のサイズ

尿管ステント	プッシャーカテーテル		尿管カテーテル	
	径	長さ	径	長さ
4.8Fr	5.0Fr	70cm	5.0Fr	70cm
6.0Fr	6.0Fr		6.0Fr	
7.0Fr	7.0Fr	45cm	6.0Fr	70cm
8.0Fr	8.0Fr			

※ガイドワイヤーセットの場合

トルネードガイドワイヤー		ゼウスガイドワイヤー	
径	長さ	径	長さ
0.035inch	150cm	0.035inch	150cm

販売元(セット詰め合わせ元)



本社 〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-25 TEL(03)3814-7761 FAX(03)3814-9694  
名古屋営業所 〒465-0078 名古屋市名東区にじが丘 2-5-107 TEL(052)781-8290 FAX(052)781-8292  
大阪営業所 〒540-0026 大阪市中央区内本町 2-1-19-811 TEL(06)6946-6629 FAX(06)6946-9413  
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-2-10 南近代ビル4F TEL(092)414-5525 FAX(092)414-5530

### ●取扱販売店名