

お取引様各位



タカイ医科工業株式会社
企画部企画課

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素より弊社製品に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

ペディトロールフットポンプトラブルの原因の報告と対処方法について
ご案内申し上げます。

1. ボールまたはボールの収納孔の汚れの蓄積によってスプリング及びボールが固着してしまっこと。
2. 使用後の洗浄がされていない、若しくは不十分で、濯ぎと乾燥も完全ではないこと。

対処方法の手順：

下記の手順に従ってボールの固着を直します。

1. ボールが見えます。



2. 汚れによってボールが固着してしまっている



3. 大き目のプラスドライバーを淵に当てテコのようにして使う。力を加える前のドライバーの位置はここです。矢印の方向へ回す。



4. 抵抗が無くなりボールが押せます。
ハウジングに戻るまで圧力をかけて下さい。



5. 完全に押せた状態



ペディトロール フットポンプ UR0002 クリーニング手順

今後の改善・対応方について：

フットポンプは使用後に、下記の手順で毎回洗浄して下さい。

1. 水道水を流しながらフットポンプを流し洗いして下さい。
2. 泡の立たない除菌剤で洗って下さい。
3. 布で、なでるように拭いて乾かして下さい。
4. すぐ乾くように70%のアルコールを塗布して下さい。
5. 乾燥した涼しい場所に保管して下さい。

以上