

ストーンスクリーン

コンパクト尿路結石採取カップ

Stone Screen


定価: 18,000円

単位: 1箱(12個入)

- 持ち運びに便利な小型サイズです。
- チャック付ビニール入りです。
- 洗浄は簡単で繰り返し使用できます。
- ふたに結石収納用ケースがついています。
- 男・女性とも使用できるデザインです。
- 入院・外来患者とも使用できるデザインです。
- ナイロン製メッシュは重要な結石・碎片を採取できるよう十分テストされています。



引っ張り上げると
カップになります

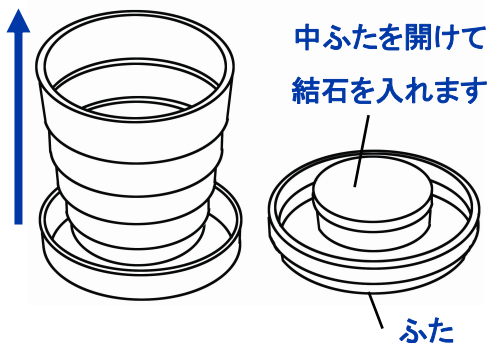

【使用方法】

- ① ストーンスクリーン本体からふたを取り外します。
- ② 中身を十分に引きカップを形成します。
- ③ カップの中央部を尿が通るように排尿します。
- ④ 排尿後、カップ底の網目部に尿結石が残っているか確認します。
- ⑤ 残留物をふたのうらにある保管スペースに入れます。
- ⑥ カップをすすいで乾燥させた後、もとのようにふたをして、次の使用に備えます。
- ⑦ 必要に応じて上記の作業を繰り返して下さい。

注意：ストーンスクリーンの使用と結石などの残留物の取り扱いについては、必ず医師の指示に従って下さい。

輸入販売元

Takai
タカイ医科工業株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川一丁目28番25号
東京ダイヤビルディング3号館9階
TEL (03) 3814-7761 FAX (03) 3814-9694
URL <https://www.takai-hs.co.jp>

製造元

THERAPAK
CORPORATION