


アナザーハンド 可動式補助固定器具 未滅菌

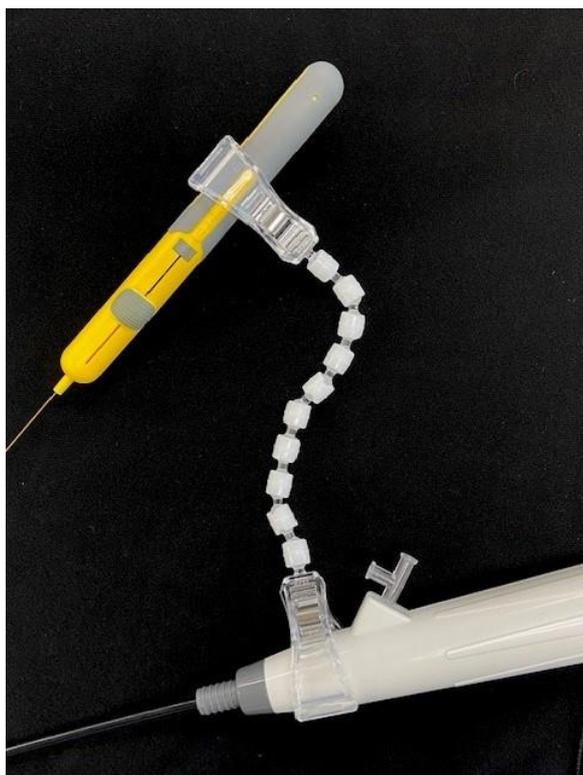

【品名】アナザーハンド

【品番】AH-LL10M

【JAN】4560136528541

【規格】

1本/1袋（未滅菌） ￥1,650

10本/箱（個包装、未滅菌） ￥16,500

【全長】27.5 cm

【クリップ部最大開口幅】共に 3 cm

【滅菌処理方法】EOG 滅菌のみ対応

■使用方法■

1. 使用前に必ず滅菌処理（EOG滅菌）を行ってから使用してください。
2. 包装から本品を取り出します。
3. 片方のクリップを使用する機器に取り付けます。
4. もう一方のクリップを稼働させたい器具・器械に取り付けます。

※最大開口幅 3 cmを超えて無理に把持させようとすると本品・取り付け機器双方に破損の恐れがあります

5. 可動アームはフレキシブルに稼働しますので、目的に応じ任意の位置に移動させてご使用ください。

※アーム調節時にはサージカルグラブの巻き込み・破損にご注意ください

※使用上のご注意※

- ・本品は Disposable のため繰り返し使用できません
- ・荷重の重い機器の保持には使用しないでください
- ・分解・改造などはしないでください



【本 社】〒104-0033 東京都中央区新川 1-28-25 東京ダイヤビルディング 3 号館 9 階

TEL (03) 6280-4255 FAX (03) 6280-4253

【名古屋 営業所】〒465-0078 名古屋市名東区にじが丘 2-5-107

TEL (052) 781-8290 FAX (052) 781-8292

【大阪 営業所】〒540-0026 大阪市中央区内本町 2-1-19-811

TEL (06) 6946-6629 FAX (06) 6946-9413

【福岡 営業所】〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 4-2-10

TEL (092) 414-5525 FAX (092) 414-5530

THS-PL-20231108-1